



PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID

Instrucciones de uso

Puralid™ Lipogel para utilizarse en blefaritis o blefaroconjuntivitis

¿Qué es Puralid Lipogel?

Puralid Lipogel es un producto oftálmico que calma y limpia los párpados y la zona periorcular. Contiene liposomas, aceite de árbol de té, vitamina A, goma xantana, ácido ferúlico, vitamina E TPGS y alfa bisabolol.

Los **liposomas**, formados por una doble capa de fosfolípidos, son conocidos por sus propiedades calmantes y emolientes, así como por la capacidad de administrar eficazmente los principios activos.

El **aceite de árbol de té**, extraído de *Melaleuca alternifolia*, es conocido por sus propiedades antimicrobianas.

La **vitamina A** fortalece y mantiene la piel regulando la función epitelial. También es un antioxidante que, junto con la **goma xantana**, el **ácido ferúlico** y la **vitamina E TPGS**, actúa en sinergia con los liposomas para proteger la superficie del párpado de la acción oxidativa de los radicales libres y los rayos UV.

El **alfa bisabolol** es el componente principal del aceite esencial de manzanilla. Tiene propiedades calmantes, reduce el enrojecimiento y la inflamación, incluso en el caso de pieles particularmente delicadas. Se caracteriza por una buena tolerabilidad de la piel.

¿Para qué se usa Puralid Lipogel?

Puralid Lipogel se usa para suavizar y eliminar residuos escamosos en el párpado durante procesos inflamatorios como blefaritis o blefaroconjuntivitis.

¿Con qué frecuencia debo usar Puralid Lipogel?


Use el producto dos veces al día, o más si se lo recomienda su médico.

Cómo usar Puralid Lipogel

1. Lávese las manos cuidadosamente.




2. Dispense una pequeña cantidad de Puralid Lipogel en la punta de los dedos.

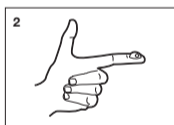

3. Extiéndalo suavemente sobre los párpados con movimientos circulares.



4. Déjelo actuar unos minutos. Limpie cualquier escama con un pañuelo de papel o disco de algodón limpios.

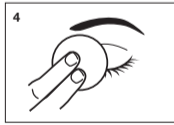

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar a usar este producto.

Conserve este prospecto; es posible que tenga que volver a leerlo.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Si los síntomas persisten o si experimenta algún efecto secundario adverso, consulte a su médico.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

SI PERCIBE CUALQUIER EFECTO SECUNDARIO QUE NO ESTÉ EN LA LISTA DE ESTE PROSPECTO, INFORME A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO.

Cómo almacenar Puralid Lipogel

- No conservar a temperatura superior a 25 °C.
- No congelar.
- Mantener alejado del calor, la humedad y la luz solar directa.
- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Composición:

Fosfolípidos S80 (de NIOLip) 1 %, bisabolol 0,1 %, aceite de árbol de té 0,05 %, palmitato de vitamina A 0,01 %, vitamina E TPGS 0,045 %, ácido ferúlico 0,04 %, goma xantana 1 %, dihidrato disódico de EDTA, sorbato de potasio, benzoato de sodio, hidroximetilglicinato de sodio, monohidrato de ácido cítrico, citrato de potasio monohidrato tribásico, agua destilada.

Advertencias

- Solo para uso externo
- Suspenda el tratamiento si es hipersensible
- No use el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase
- No use el producto si el envase está dañado
- Use el producto dentro de las 8 semanas desde la primera dispensación (frasco de 15 ml)
- Use el producto dentro de las 24 horas posteriores a la primera dispensación (mini envase de 1 ml)

Presentaciones:

Comercial - frasco de 15 ml

Muestra - tira de 5 mini envases de 1 ml

Cuidemos el medio ambiente. No tire el envase a la basura, colabore a su reciclado depositándolo en el Punto SIGRE de la farmacia.

Para más información, póngase en contacto con su médico o su oficina local de Santen en www.santen.eu

Santen

Este folleto fue validado en abril de 2020



OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello 10, 50144 Florencia, Italia

Símbolo							
Significado del símbolo	Proteger de la luz solar	Proteger de la humedad	Consulte las instrucciones de uso	Fabricante de productos sanitarios	No conservar a temperatura superior a 25 °C	No usar si el envase está dañado	Fecha de caducidad

016631



PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID

Instruções de utilização

Puralid™ Lipogel para utilização em blefarite e blefaroconjuntivite

O que é Puralid Lipogel?

Puralid Lipogel é um produto oftálmico que suaviza e limpa as pálpebras e a região periocular. Contém lipossomas, óleo da árvore de chá, vitamina A, goma xantana, ácido ferúlico, vitamina E TPGS e alfa bisabolol.

Os **lipossomas**, formados por uma dupla camada de fosfolípidos, são conhecidos pelas suas propriedades suavizantes e emolientes, bem como pela capacidade de distribuírem eficazmente os ingredientes ativos.

O **óleo da árvore de chá**, extraído da *Melaleuca alternifolia*, é conhecido pelas suas propriedades antimicrobianas.

A **vitamina A** reforça e mantém a pele ao regular a função epitelial. É também um antioxidante que, juntamente com a **goma xantana**, o **ácido ferúlico** e a **vitamina E TPGS**, atua em sinergia com os lipossomas para proteger a superfície da pálpebra contra a ação oxidativa dos radicais livres e dos raios UV.

O **alfa bisabolol** é o principal componente do óleo essencial de camomila. Tem propriedades suavizantes, reduz a vermelhidão e a inflamação, mesmo no caso de pele particularmente delicada.

É caracterizado por uma boa tolerabilidade da pele.

Para que é utilizado Puralid Lipogel?

Puralid Lipogel é utilizado para amolecer e remover os resíduos de descamação na pálpebra durante eventos inflamatórios, como blefarite ou blefaroconjuntivite.

Com que frequência devo utilizar Puralid Lipogel?


Utilizar o produto duas vezes por dia, ou mais, se aconselhado pelo seu médico.

Como utilizar Puralid Lipogel


1. Lavar as mãos cuidadosamente.




2. Distribuir uma pequena quantidade de Puralid Lipogel nas pontas dos dedos.

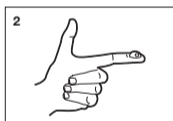

3. Espalhar delicadamente nas pálpebras aplicando movimentos circulares.

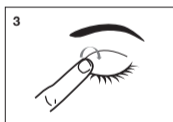

4. Deixar atuar durante alguns minutos. Remover quaisquer resíduos com um lenço de papel limpo ou um disco de algodão.

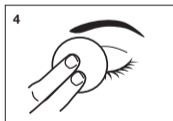

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este produto.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Se os sintomas persistirem ou se tiver quaisquer efeitos secundários, consulte o seu médico.

Quais são os efeitos secundários possíveis?

SE TIVER QUAISQUER EFEITOS SECUNDÁRIOS QUE NÃO ESTEJAM INDICADOS NESTE FOLHETO, INFORME O SEU MÉDICO OU FARMACÊUTICO.

Como conservar Puralid Lipogel

- Não conservar acima de 25 °C
- Não congelar
- Manter afastado do calor, humidade e luz solar direta
- Manter fora do alcance e da vista das crianças

Composição:

Fosfolípidos S80 (por NIOLip) 1%, bisabolol 0,1%, óleo da árvore de chá 0,05%, vitamina A palmitato 0,01%, vitamina E TPGS 0,045%, ácido ferúlico 0,04%, goma xantana 1%, EDTA dissódico di-hidratado, sorbato de potássio, benzoato de sódio, hidroximetilglicinato de sódio, ácido cítrico mono-hidratado, citrato de potássio mono-hidratado tribásico, água destilada.

Advertências

- Apenas para uso externo
- Pare o tratamento em caso de hipersensibilidade
- Não utilize o produto após o prazo de validade indicado na embalagem
- Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada
- Utilize o produto no prazo de 8 semanas após a primeira distribuição (frasco de 15 ml)
- Utilize o produto no prazo de 24 horas após a primeira distribuição (mini-recipiente de 1 ml)

Apresentações:

Comercial – frasco de 15 ml

Amostra – tira com 5 mini-recipientes de 1 ml

Para mais informações, contacte o seu médico ou o escritório local da Santen em www.santen.eu

Santen

Este folheto foi validado em abril de 2020



OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello 10, 50144 Florença, Itália

Símbolo							
Significado do símbolo	Proteger da luz solar	Proteger da humidade	Consultar as instruções de utilização	Fabricante de dispositivos médicos	Não conservar acima de 25 °C	Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Utilizar até



MARVACO OY
PELTOTIE 20,
FIN-28400 **ULVILA**, FINLAND
repro@marvaco.fi
marvaco.fi • marvaco.se

18.05.2020

Proof No. 4

Santen

Part No: 3413-01

Leaflet Puralid Lipogel

Item No: 016598, 016599

Dimensions: 130x360 mm

Fonts/Size:
Helvetica Neue 8-16 pt

Country: ES, PT

Component code:
016631

Colors:



Black



Technical

PLEASE, CHECK THE SPOT COLORS FROM PANTONE® COLOR GUIDE.