



CATIONORM
CATIONORM
CATIONORM
CATIONORM
CATIONORM
CATIONORM

Instrucciones de uso

Colirio, emulsión

Lea atenta y completamente este prospecto antes de empezar a utilizar este producto.

Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.

En caso de que tenga dudas, consulte con su médico o farmacéutico.

Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

1. Qué es Cationorm® y para qué se utiliza

Cationorm® es un colirio en forma de emulsión oftálmica estéril e hipotónica, sin conservantes, que se presenta como un líquido de aspecto lechoso.

Cationorm® se utiliza para el tratamiento de los síntomas del ojo seco tales como la sensación de picor, comezón, ardor, o sensación de arenilla o de cuerpo extraño en los ojos. Estos síntomas pueden estar causados por factores externos tales como el aire acondicionado, la contaminación, viajes en avión, cirugía refractiva, uso de pantallas de ordenador, llevar lentes de contacto, etc., o por enfermedades, como la disfunción de las glándulas de Meibomio. Cationorm® hidrata, lubrica y protege la superficie ocular.

2. Antes de utilizar Cationorm®

No utilice Cationorm® si tiene alergia a cualquiera de los componentes del producto.

Este producto no está destinado al tratamiento de otras afecciones oculares.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de duda.

Si está utilizando simultáneamente otros colirios, debe esperar al menos 5 minutos entre la aplicación de cada colirio. Se recomienda que Cationorm® sea el último en administrar. Cationorm® es compatible con todos los tipos de lentes de contacto.


3. Cómo utilizar Cationorm®

USO OCULAR.

La dosis recomendada es de 1 gota en cada ojo, de 1 a 4 veces al día.

Instrucciones de uso:

- Lávese las manos.
- Separe un envase unidosis.
- Abra la unidosis retorciendo firmemente su tapa.
- Inclíne la cabeza hacia atrás.
- Tire suavemente del párpado inferior hacia abajo y mire hacia arriba.
- Sostenga el envase unidosis por encima del ojo y presione suavemente para hacer caer una gota dentro del ojo, y luego parpadee varias veces.

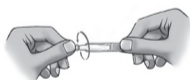

- No toque el ojo ni las pestañas con la punta del envase monodosis.

Uso único.

La unidosis debe utilizarse inmediatamente después de su apertura y debe tirarse después de su uso.

La reutilización de una unidosis abierta puede originar un riesgo de infección.

4. Cuáles son los posibles efectos adversos

En casos muy raros, puede experimentar molestias transitorias en el ojo, como por ejemplo: irritación, dolor, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, picazón, lagrimeo, sensación de ardor, visión turbia transitoria, o inflamación o hinchazón de los párpados. Estos son también síntomas típicos de la enfermedad del ojo seco, y se encuentran asociados a las afecciones médicas subyacentes de los pacientes que sufren la enfermedad del ojo seco.

SI DETECTA CUALQUIER EFECTO ADVERSO QUE NO FIGURE EN ESTE PROSPECTO, INFORME A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO.

5. Cómo conservar Cationorm®

Conserve los envases unidosis en el envase de origen a temperatura ambiente.

Mantenga fuera del alcance y de la vista de los niños.

No utilice la unidosis si observa signos visibles de deterioro.

No utilizar después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

Se debe desechar inmediatamente después de su uso cualquier envase unidosis individual abierto con restos de emulsión.

Cuidemos el medio ambiente. No tire el envase a la basura, colabore a su reciclado depositándolo en el Punto SIGRE de la farmacia.

Cationorm® contiene: Aceites minerales, glicerol, tiloxapol, poloxamer 188, tris-hidrocloruro, trometamina, cloruro de cetalconio (como agente catiónico) y agua para preparaciones inyectables.

Cada envase unidosis de Cationorm® contiene 0,4 ml de emulsión estéril.

Para obtener más información, póngase en contacto con su médico/farmacéutico o la oficina de Santen en www.santen.es.



Santen

Este prospecto se revisó por última vez en Agosto de 2022.

Leyenda:

Símbolo								
Significado	Fabricante	Almacenar por debajo de 30 °C	Estéril utilizando técnica aséptica	Código de lote	Fecha de caducidad	Consultar el prospecto antes de utilizar	Uso único No reutilizar	No utilizar si el sistema de barrera estéril o el envase del producto están dañados

Fabricante:
Santen
Bâtiment Genavenir IV
1, rue Pierre Fontaine
91000 EVRY COURCOURONNES
Francia